

# Fixture 포장개봉 및 제품 추출 순서


## Ampule 꺼내기



- 1 상단 점선 부위를 눌러 개봉한 후 멸균된 상태의 Blister 꺼내기



- 2 Blister 뒷면의 습포지를 제거한 후 Ampule을 시술자의 손바닥이나 수술보에 살짝 떨어뜨림

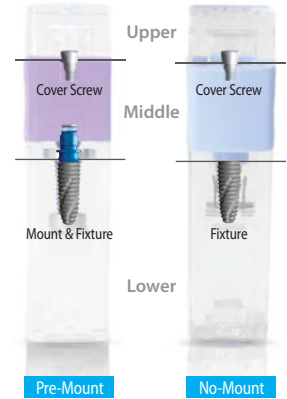

## Fixture 분리



- 1 Ampule을 양손으로 잡고 45°비틀어 Middle을 분리, 이 때 Fixture가 떨어지지 않도록 주의




- 2 Mount Driver를 Mount에 체결




- 3 Fixture Driver를 Fixture에 체결



Mount를 파지하고 있는 Plastic Ring을 옆으로 제거하는데 이 때 Fixture에 손이 닿지 않도록 주의

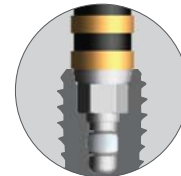

완전체결 O

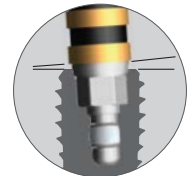

불안전체결 X

Ampule을 조금씩 움직여 완전히 체결하여 Fixture를 떨어뜨리지 않도록 주의

## Cover Screw 분리



- 1 Ampule 상단의 Upper 분리



- 2 Hex Driver를 이용하여 Cover Screw를 Fixture에 체결 (환자가 삼키지 않도록 주의)